

Сделано в Германии

HERPOtherm®

Предотвращает развитие кожных проявлений герпеса.

Снижает степень выраженности: жжения, покалывания, зуда

Для наружного применения



RIEMSER



**HERPOtherm® !**  
**С простудой на губах  
больше нет проблем!**



# Коротко о главном

- 👄 Лабиальный герпес – острое инфекционное заболевание с возбудителем вирусного типа
- 👄 Основная область локализации – губы человека и ближайшие зоны вокруг них
- 👄 Возбудителем инфекции является вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1), который, попадая в организм человека, остается в нем на всю жизнь
- 👄 Носителями в неактивной форме является до 90% всех людей

# Коротко о главном

## Причины обострения лабиального герпеса:

- 👄 Стресс, переутомление
- 👄 Простуда, грипп
- 👄 Менструация, беременность
- 👄 Переохлаждение, перегрев на солнце
- 👄 Повреждения губ (царапины, солнечные ожоги)
- 👄 Отравления, в том числе неумеренный прием алкоголя

«Я замучалась уже, да и вид ужасный.  
У меня 2 раза в месяц строго выскакивает.  
Если понервничаю или замерзну или  
после головной боли - сразу начинает  
щипать и вылезает герпес.»

ЦА:  
**Женщины 18-45**  
**Доход В+, С**



# Что «ей» нужно?

## Нужно быстро!

- Косметический эффект
- Убрать визуальные проявления лабиального герпеса
- Избавиться от прочих симптомов: жжение, зуд, отёк

## Нужно безопасно!

- «Не хочу пить химию»
- «А есть народные методы?»
- «Растительное посоветуйте что-нибудь»

Всем приветик! У меня проблемка :cry: . Съездила на три дня на море и от перемены климата у меня на губах обсыпала "простуда" или герпес. А через три дня у нас большое торжество на предприятии - нам 15 лет. И хочется выглядеть соответственно



*Противовирусные препараты помогают  
подавить размножение вируса, и сократить  
длительность вспышки,  
и лишь косвенно облегчают симптомы*

## Общее Позиционирование:

*HERPOtherm® - первое в РФ инновационное изделие медицинского назначения для симптоматического лечения лабиального герпеса, по эффективности превосходящее ацикловир.*



## Слоган:

 «HERPOtherm® - с простудой на губах больше нет проблем!»

# Механизм действия

Мгновенный и предельно сосредоточенный тепловой импульс в диапазоне 51° С



Импульс в течении 4-х секунд исключает факт повреждения кожи и запускает физиологические процессы в области заражения





Высвобождение гистамина при взаимодействии антигена вместе с ферментами

Понижение уровня энзимов снимает воспаление

Активация тучных клеток


Разрушение токсинов

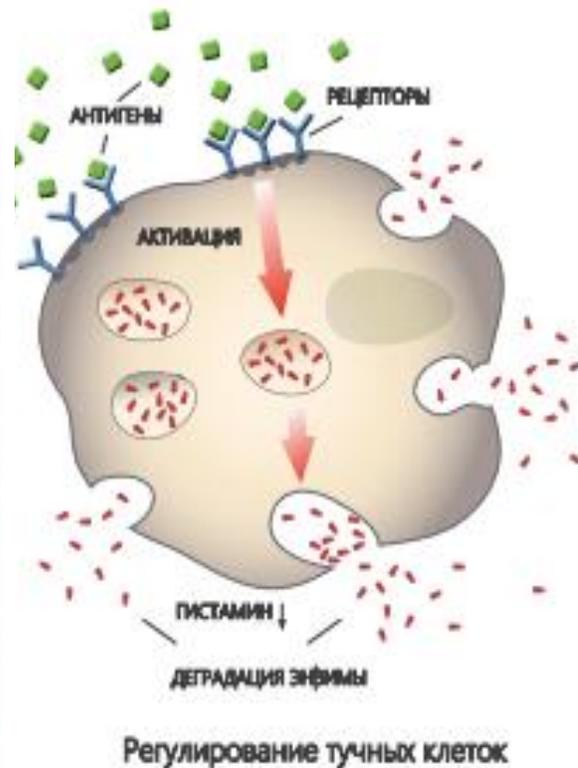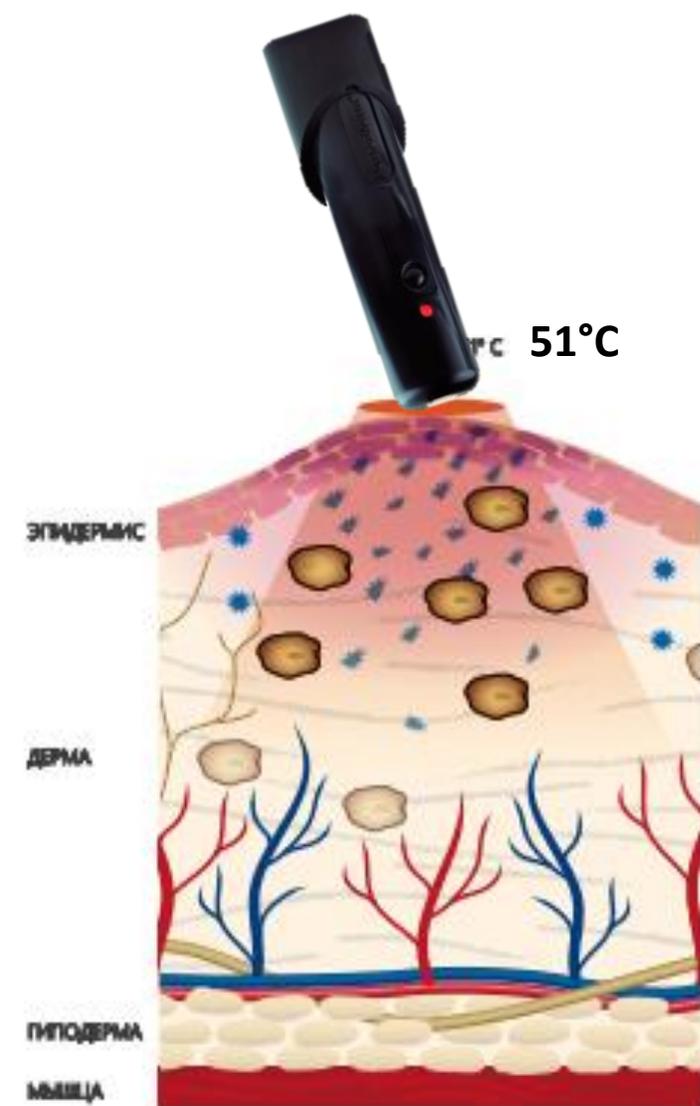

# Эффективность **HERPOtherm®** доказана в сравнительном исследовании с ацикловиром

- Лечение гипертермией значительно уменьшило признаки болезни герпесом **уже на второй день**
- Уменьшение симптомов (50 %) в целом в 1-й группе было достигнуто **на 2 дня раньше**, чем во второй
- Средняя длительность заболевания **составила 2,3 дня (Herpothem)** против **4,5 дня (ацикловир)**

- При лечении герпеса обнаружена **высокая эффективность использования Herpothem у 53 % пациентов**, и лишь у 12 % с применением ацикловира (рис. 1Б)
- Более 90 %** участников обеих групп отметили очень хорошую переносимость проводимого лечения

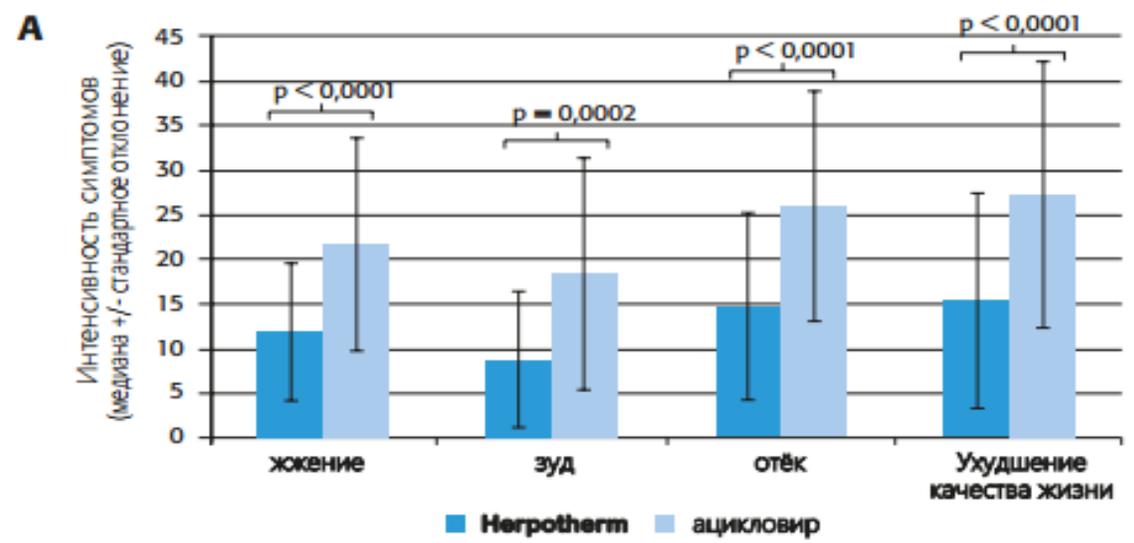

The use of local concentrated heat versus topical acyclovir for a herpes labialis outbreak: a randomized controlled trial. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, 2013; 9(1): 1-6. Authors: Johannes Wohlrab, Franziska Vogt, Christian Müller, Lars C. Brenn. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2013;6: 263-271





💋 В 2 раза эффективнее терапии ацикловиром (наружное применение)

💋 Избавляет от зуда, отёка, жжения в 2 раза быстрее ацикловира (наружное применение)

💋 300 применений на одной батарейке

💋 Немецкое качество

💋 Не имеет аналогов на рынке